


Installation recommandée

Il convient d'installer le stérilisateur Anprolene près d'un mur donnant sur l'extérieur et de canaliser les gaz d'échappement directement vers l'extérieur au moyen d'un tuyau de 1,9 cm de diamètre interne. Ce type d'installation permet de limiter l'impédance du système d'échappement.


Des kits d'installation de traversée murale sont disponibles auprès d'Andersen Sterilizers.

Remarque : Le stérilisateur doit être placé à un endroit où il est possible de maintenir une température ambiante supérieure ou égale à 20° C et l'humidité relative doit être maintenue entre 30 % et 60 % dans toutes les zones de travail.

Connecteur de raccordement rapide

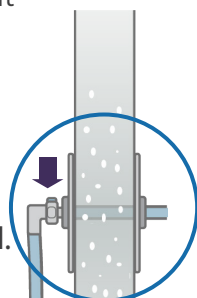


Extérieur*

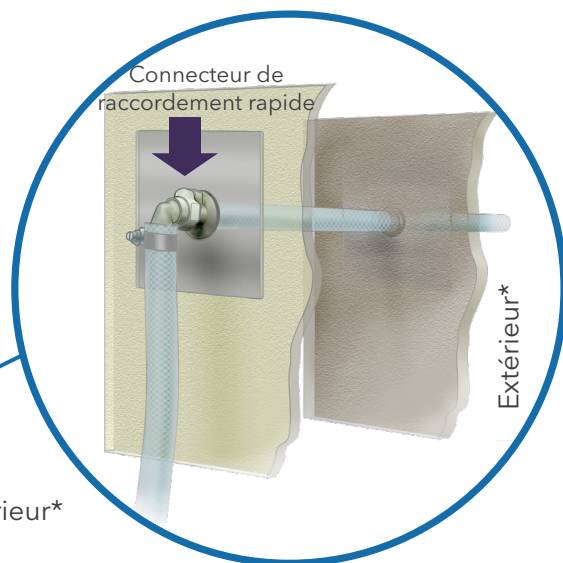

Le stérilisateur Anprolene AN75 doit être placé à proximité d'une prise de courant non commutée et reliée à la terre, cette prise devant être utilisée exclusivement pour le stérilisateur. Cette prise ou ce disjoncteur ne doivent pas être équipés d'une protection différentielle.

Autre option 1

Installation à distance du mur extérieur

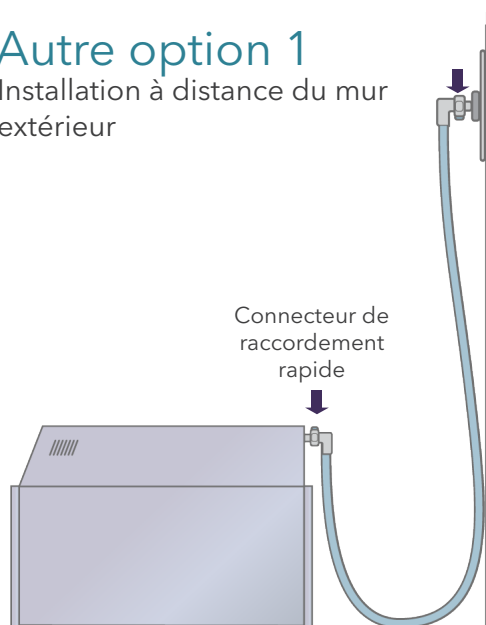

Connecteur de
raccordement
rapide

Le tuyau tressé de 1,9 cm de diamètre interne peut être déployé sur une longueur de 60 m, ce qui permet de placer le stérilisateur à distance du mur extérieur. Choisissez un trajet qui évitera toute obstruction ou tout dommage au tuyau d'échappement.

Remarque : L'installation dans les zones désignées comme plénum nécessite l'utilisation de matériaux adaptés au plénum.


Mur
extérieur*

Autre option 2

Installation à distance du mur extérieur

Le kit d'installation de traversée murale peut également être utilisé comme support de plafond pour permettre une terminaison en soffite ou en débord de toit.

Des raccords rapides droits sont disponibles auprès d'Andersen Sterilizers.

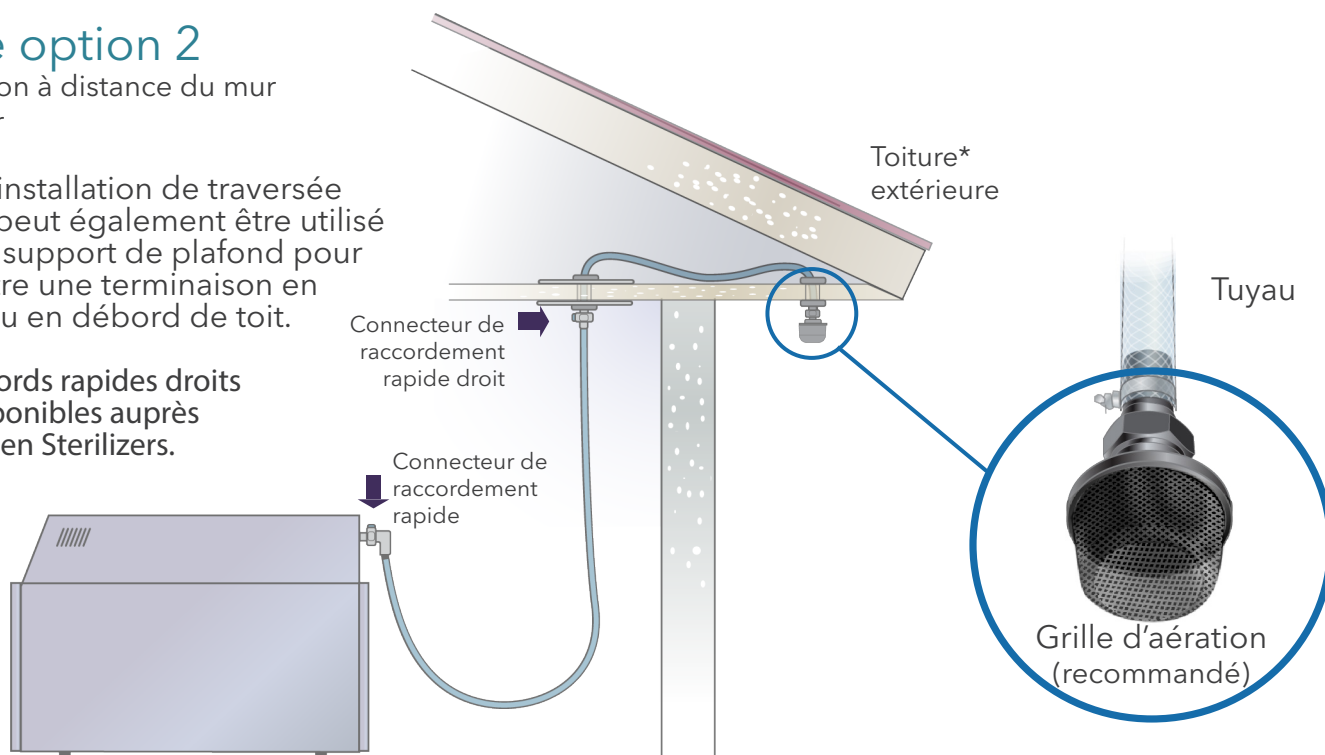

Important : Ne pas réunir l'échappement de plusieurs appareils en un flux de gaz d'échappement unique, cette situation peut altérer la sécurité et les performances du stérilisateur.

Eviter à tout prix toute intrusion d'eau ou de corps étrangers dans le système d'échappement.*

Caractéristiques électriques nominales					
Réf. modèle	Anprolene	Tension	Hz	Puissance	Calibre des fusibles
AN75.64	75i	120 VCA \pm 10 %	50/60	150 W	2 A
AN75.74	75j				
AN75.65	75i	230 VCA \pm 10 %	50/60	150 W	1 A
AN75.75	75j				

***Remarques :** Les directives de l'AAMI recommandent pour tous les stérilisateurs à OE de prévoir un tuyau d'échappement dédié à l'appareil, avec une évacuation directe vers l'extérieur ou par l'intermédiaire d'un dispositif antipollution. Le conduit d'évacuation doit déboucher à plus de 7 mètres de toute prise d'air frais du bâtiment ou de toute voie de circulation de piétons ou d'animaux, et doit empêcher l'oxyde d'éthylène d'être libéré dans le bâtiment ou d'y être aspiré.

Pour toute assistance supplémentaire concernant l'installation, veuillez appeler votre représentant Andersen ou appelez le 1 800 523 1276