


Installation recommandée

Dans la mesure du possible, il convient d'installer le stérilisateur Anprolene contre un mur donnant sur l'extérieur et de diriger les gaz d'échappement directement vers l'extérieur au moyen d'un tuyau de 1,9 cm de diamètre interne. Des kits d'installation de traversée murale sont disponibles auprès d'Andersen.


Remarque : Le stérilisateur doit être placé à un endroit où il est possible de maintenir une température ambiante supérieure ou égale à 20 °C.

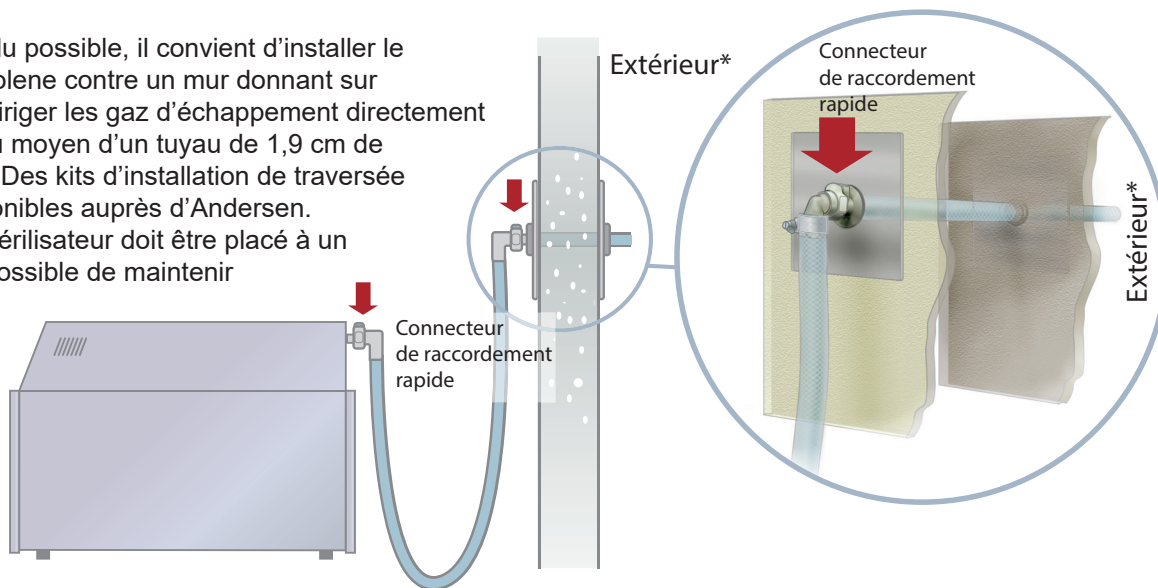


Autre option 1 *Installation en traversée de toit avec une gaine de ventilation*

Pour les installations en traversée de toit, installer un conduit PVC SCH 40 de 5,1 cm dans une gaine de ventilation et placer ce conduit PVC de façon à ce qu'il débouche juste en dessous du plafond. Un adaptateur 1,9 cm/5,1 cm de diamètre intérieur est disponible auprès d'Andersen.

Remarque : Le conduit d'échappement en PVC SCH 40 de 5,1 cm peut parcourir jusqu'à 243,8 m, tout coude à 90° réduit cette distance.

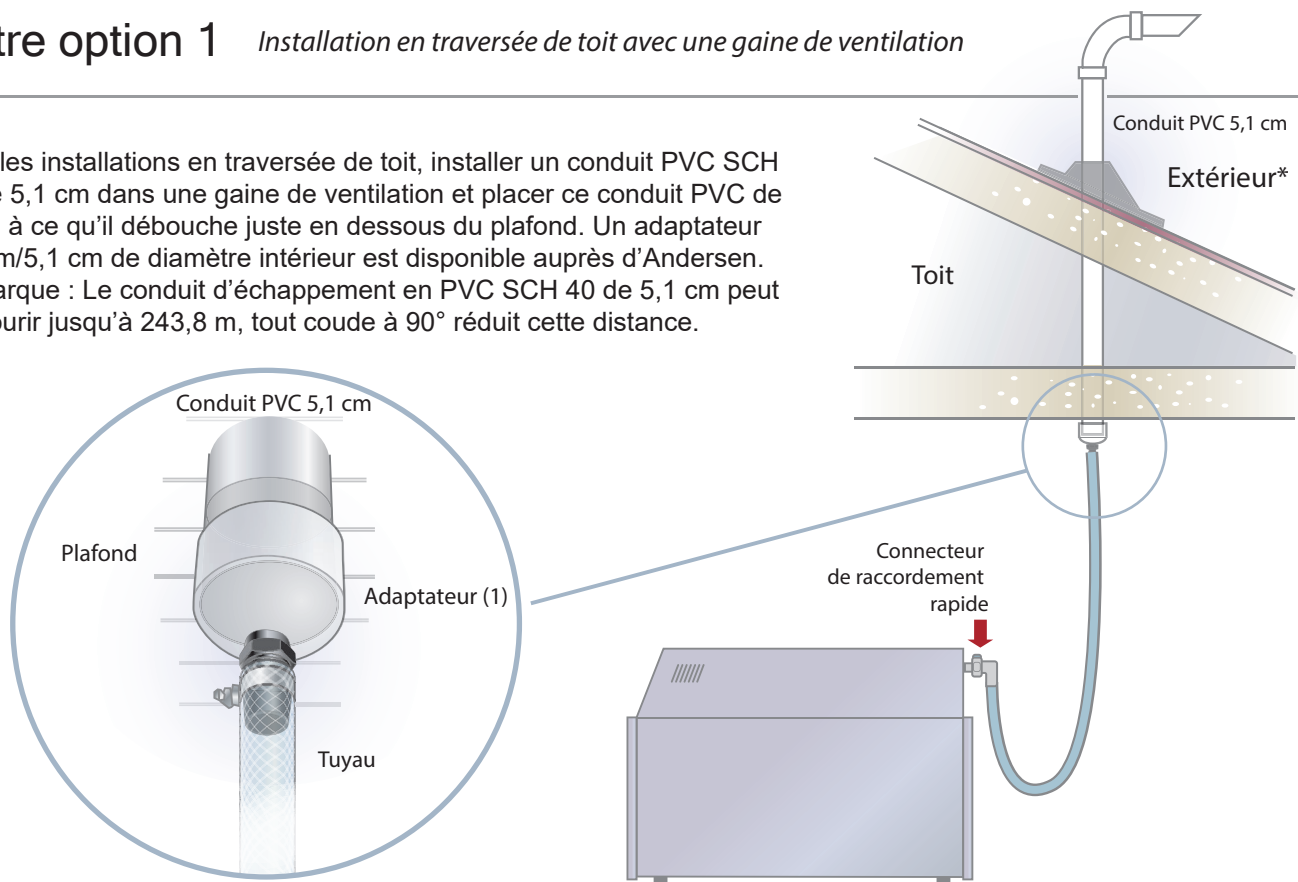


Autre option 2 *Installation à distance de la sortie*

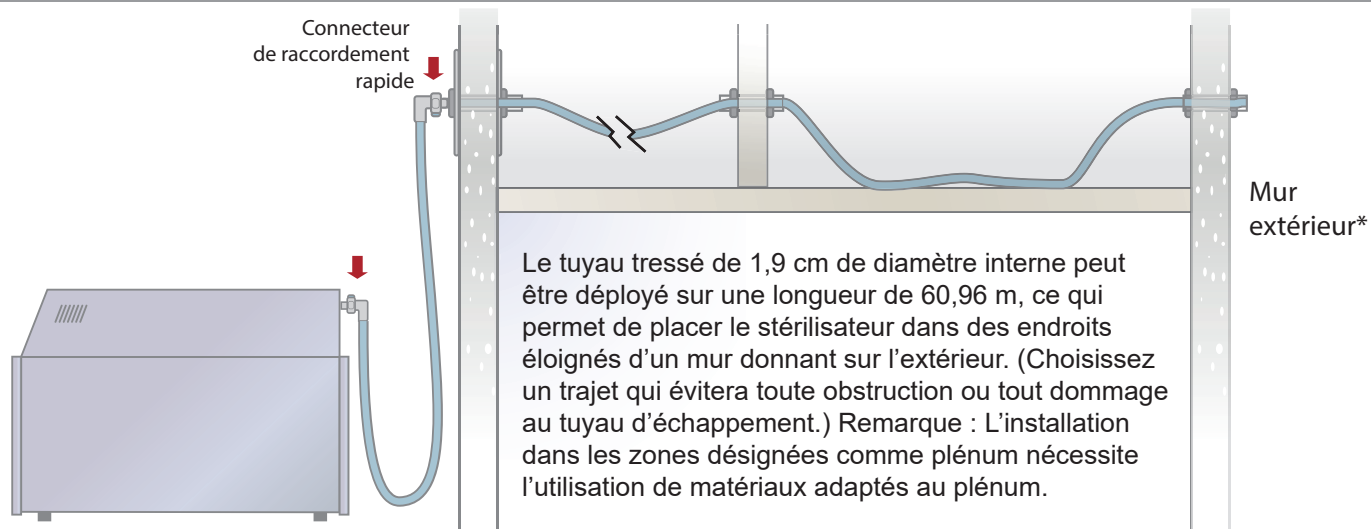

Autre option 3 *Terminaison en soffite ou en débord de toit*

Le kit d'installation de traversée murale peut également être utilisé comme support de plafond pour permettre une terminaison en soffite ou en débord de toit. Des raccords rapides droits et des grilles d'aération sont disponibles auprès d'Andersen.

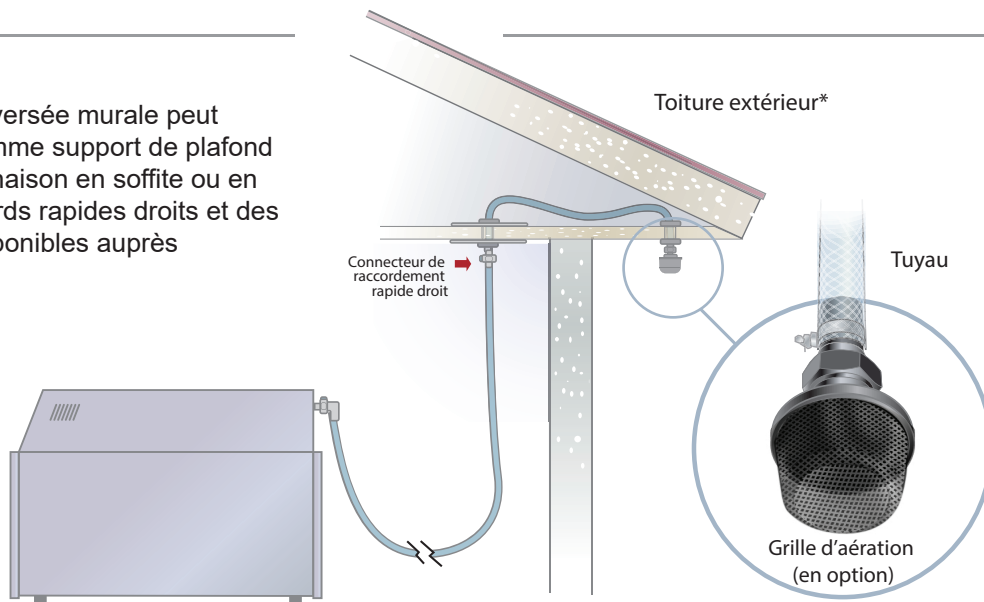

***Remarques :** Les directives de l'AAMI recommandent pour tous les stérilisateurs à OE de prévoir un tuyau d'échappement dédié à l'appareil, avec une évacuation directe vers l'extérieur ou par l'intermédiaire d'un dispositif antipollution. Le conduit d'évacuation doit déboucher à plus de 7,6 m de toute prise d'air frais du bâtiment ou de toute voie de circulation de piétons ou d'animaux, et doit empêcher l'oxyde d'éthylène d'être libéré dans le bâtiment ou d'y être aspiré.

Pour toute assistance supplémentaire concernant l'installation, veuillez appeler votre représentant Andersen ou 1.800.523.1276



ANDERSEN
STERILIZERS

sterility.com

Rejoignez-nous : suivez, aimez, partagez



MADE WITH PRIDE



IN THE USA



#3004634710

